

EverFlo™

Kurzanleitung

LED Alarmanzeige
Schalten Sie hier
den Konzentrator ein



Schließen Sie
Ihre Nasenkanüle
an den
Sauerstoffauslass
an.

Drehen Sie das
Stellrad zum
Einstellen der
Sauerstoffabgabe
auf 0,5 bis
5 LPM ein

*Beispielseinstellung
von 2 LPM*



Nötige Produktpflege:
Reinigen Sie regelmässig die
Oberfläche des Gerätes mit einem
feuchten Tuch. Stellen Sie sicher,
daß die Filteröffnungen nicht
verstopft sind.

SO SCHLIESSEN SIE IHREN LUFTBEFEUCHTER AN:

EverFlo™ Kurzanleitung



1. Nehmen Sie den Verbindungsschlauch aus der Filterkappe.



2. Verbinden Sie den Verbindungsschlauch mit der Befeuchterflasche



3. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Sauerstoffauslaß

ALARME

● Das Gerät ist eingeschaltet und arbeitet einwandfrei.

Nur
akustischer
Alarm

Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob es einen Stromausfall gibt.

● ●

Geringe Sauerstoffkonzentration: nutzen Sie das Gerät weiter, verständigen Sie jedoch Ihren medizinischen Fachhändler.

● ●

Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Bleibt der Zustand erhalten, so schalten Sie das Gerät aus und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.

● ● ●

Schalten Sie das Gerät aus: prüfen Sie ob das Netzkabel eingesteckt ist, prüfen Sie das Sauerstoffeinstellrad, prüfen Sie die Nasenkanüle, prüfen Sie die Verbindung zum Befeuchter.

● ● ●

Schalten Sie das Gerät aus. Nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.

Bleibt der Alarmzustand bestehen so nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und verständigen Sie Ihren medizinischen Fachhändler.

RESPIRONICS®

Respironics Inc.: +1-724-387-4000

Respironics Europe, Africa, Middle East: +33-1-47-52-30-00

Respironics Deutschland: +49 (0) 8152 93 06-0

WWW.RESPIRONICS.COM

Diese Kurzanleitung ist als Kurznachschlagewerk für den Einsatz des EverFlo gedacht. Sie ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung, die vollständige Informationen und Anleitungen für den Einsatz des Gerätes enthält.

Respironics ist ein registrierter Markenname und EverFlo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Respironics, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen.

© Respironics Inc. und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

RIT.HMV.015.G